

布製マスクの配布・洗い方について

文部科学省より布製マスクが生徒1人につき2枚配布されることとなりました。今回は1枚目の配布となり、もう1枚のマスクは5月中旬頃配布される予定です。

布製マスクは下記の手順で洗うことができます。You Tube でも「布マスクをご利用のみなさまへ」で検索していただくと動画で観ることもできますので、ご活用ください。

<https://www.youtube.com/watch?v=AKNNZRRo74o>

①布マスク洗濯に使うものです。



- ・衣料用洗剤
- ・塩素系漂白剤
- ・清潔なタオル
- ・大きめの桶
- ・台所用手袋
- ・洗濯ばさみ

②桶に表示通りの衣料用洗剤を入れます。



- ・洗剤の量は、水2Lに対して0.7g位が目安です。
- ・小さいスプーンで1/2位の量です。

③洗剤の中にマスクを入れ10分待ち、10分後に軽く押し洗いをします。



この時、もみ洗いはしない！



④洗い終わったら洗剤を流し、再度、桶に水をためてマスクの洗剤を十分すすぎます。



⑤十分すすげたら水気を切り、形を整えて日陰で乾かします。



マスクの汚れが気になる場合や、衛生を保つ上で消毒したい場合は、塩素系漂白剤を使用して洗濯することもできます。



塩素系漂白剤を使用する場合

マスクの汚れが気になる場合や、衛生を保つ上で消毒したい場合は、塩素系漂白剤を使用して洗濯することもできます。

① 台所用の塩素系漂白剤布を使います。

塩素系漂白剤を使用するときは、手袋を着用してください



② 桶に水を入れ、1Lに対して15ml程度漂白剤を入れ、その中にマスクを10分ひたします。



③ 10分たったら、桶の漂白剤を流します。漂白剤がしっかり落ちるように2回すすぎます。



④ 十分すすげたら水気を切り、形を整えて日陰で乾かします。

